

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: Кресло-коляска с санитарным оснащением
«Ortonica» TU 55

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи 25.11.2019



Сервисное обслуживание приборов производится в ООО "Реамед",
Контактный телефон: 8(473) 233-03-32
Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, 11

Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами

Кресло-коляска с санитарным оснащением

«Ortonica» TU 55



Паспорт и инструкция пользователя

ИНВ. № 4 410106288

1. Назначение

1.1 Кресло-коляска с санитарным оснащением «Ortonica» TU 55 предназначена для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в туалетных или других помещениях при самообслуживании, а также при уходе за инвалидом; используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

2. Основные технические характеристики

Ширина общая	63 см
Ширина сидения	45 см
Диаметр колес (перед. /зад.)	20 / 60,5 см
Высота сиденья	55 см
Высота кресла-коляски	99 см
Грузоподъемность	120 кг
Вес кресла-коляски	21 кг

3. Комплект поставки

- 3.1 Кресло-коляска с санитарным оснащением «Ortonica» TU 55.....1 шт.
3.2 Паспорт.....1 шт.

Примечание!

Кресло-коляска не укомплектовывается насосом и ремкомплект в случае установки цельнолитых шин.

4. Меры безопасности

- 4.1. При посадке в кресло-коляску и высадке из него, рычажный тормоз должен быть надежно зафиксирован.
4.2. Не становиться на опоры для ног во избежание опрокидывания и поломки пластмассовых деталей.
4.3. Запрещено использовать изделие с неисправными тормозами.

ВНИМАНИЕ!

Тормозные механизмы являются стояночными и не предназначены для торможения при передвижении.

4.4. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать кресло-стул на препятствие высотой более 4 см без подъема передних колес.

4.5. Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима помощь сопровождающего.

5. Устройство

Рама кресла-коляски изготовлена из антикоррозийных материалов имеет защитно-декоративное лакокрасочное покрытие. Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Сиденье выполнено из двух частей: основной и съемной (центральной) Материал изготовления покрытия для сиденья и подлокотников – кожаменитель, для спинки – нейлон. Санитарное устройство выдвижное и съемное.

Кресло-коляска комплектуется съемными и регулируемыми по высоте подножками. Кресло-коляска снабжена стояночным тормозом. Кресло-коляска комплектуется колесами, имеющими полиуретановые или литые задние и литые передние шины. Подлокотники откидные, съемные.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию указанной модели, не ухудшающих ее потребительских свойств.

6. Указания по эксплуатации

- 6.1. Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально.
6.2. Используя кресло-стул как туалет, необходимо установить судно и поднять крышку сиденья.

7. Уход и обслуживание

- 7.1. Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.
7.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.
7.3. Один раз в месяц необходимо произвести:
- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверить давление в шинах (при наличии таковых);
7.4. Один раз в 6 месяцев необходимо произвести: смазку подшипников

8. Гарантии изготовителя

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.
8.3. Срок службы изделия 4 года.
8.4. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:
- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия высотой более 4 см без подъема передних колес.

Импортер: ООО «Реамед»

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13491 от 27.12.2012 года.

Представитель в России по гарантийному ремонту и обслуживанию:

ООО «Реамед»

Адрес : 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т 11.

Тел: (473) 233-0-332

Изготовитель: ZhenJiang Assure Medical Equipment Co., Ltd, «Джеджанг Ашуре Медикал Эквипмент Ко.», (Лтд), Китай,